

Nervový blok/manipulační figurína pro úlevu od bolesti



Popis

Učí správné umístění jehly do nervových bloků pro zvládání bolesti pod kontrolou rentgenového zesilovače obrazu.

Studenti budou schopni využít své znalosti anatomie povrchu k identifikaci vhodných míst pro různé nervové bloky, místa vpichu jehly, úhlu směru a jak vytáhnout jehlu a nasměrovat ji ke změně úhlu.

Studenti se také naučí, jak rozpoznat kontakt s hlubokými kostními strukturami a jak používat radiologický screening k zajištění správného umístění jehly, včetně orientace obrazu, identifikace vhodných radiografických orientačních bodů a koncového bodu simulace pro získání správného radiografického vzhledu.

Pomocí figuríny naučte následující nervové bloky:

Blokáda celiakálního nervu
Injekce cervikálního fasetového kloubu
Injekce cervikálního, hrudního a bederního fasetového kloubu a radiofrekvenční denervace zadního primárního ramene
Epidurální injekce na všech úrovních páteře
Bederní sympatický blok
Injekce sakroiliakálního kloubu
Blokáda splanchnického nervu
Blokáda horního hypogastrického nervu
Blokáda trigeminálního ganglia nebo umístění radiofrekvenční jehly
Figurína se skládá ze speciálně potažené plastové hlavy lidské kostry potažené umělou kůží a těla tělové barvy potažené látkou.

Nízká hustota rentgenového záření figuríny snižuje dávky záření používané během simulovaných procedur.

Zahrnuje figurínu 38-1/2 palce D x 17-3/4 palce Š x 13-3/4 palce H, 4minutové DVD a leták znázorňující použití figuríny a pevné přepravní pouzdro.

Dvouletá záruka.