

Dětská IV paže - Batole



Popis

Realistická malá batolecí paže zapuštěnou kruhovou hadičkou na použití umělé krve pro IV trénink . Tato batolecí IV tréninková paže je skvělá pro nácvik odběru krve, zavádění IV, podávání injekcí nebo pro účely očkování.

Paže je vyrobena z vynikajícího měkkého silikonu s vloženou zakřivenou silikonovou hadičkou (žíla). Žíly jsou částečně viditelné a lze je nahmatat. Procvičte si intravenózní kanylaci nebo odběr krve.

Tento produkt obsahuje:

- IV tréninková paže
- Výměnná umělá žíla
- Opravný silikon 40 gramů
- stříkačka 10ml a 30ml

Jak používat cvičební IV paži batolete:

- Odpojte jednu stranu trubice od konektoru a odstraňte vzduch z trubice.
- Naplňte zkumavku řídkou umělou krví dokud se 10 ml stříkačka nenaplní a zkumavku znovu připojte.
- Lehce zatlačte na obě stříkačky a na 10ml stříkačku zatlačte o něco silněji.
- Při použití tenkých jehel se otvory samy uzavřou.

Tento model nebude mít dostatečný tlak k dosažení zpětného toku při zavádění jehly.

Příliš velký tlak na žílu může způsobit únik předchozích vpichů.

Tréninková paže MEDICFX Pediatric IV je vyrobena z velmi měkkého a odolného silikonu.

Rozměry: velikost batolecí ruky

Hmotnost: 0,5 kg