

Podložka pro IV kanylaci, návlek na paži - Kojenec



Popis

Podložka na paži pro intravenózní kanylaci - návlek s vloženou kruhovou krevní linií pro IV trénink . Tento IV tréninkový návlek na paži je skvělý pro nácvik odběru krve, zavádění injekcí, podávání injekcí nebo pro účely očkování.

Návlek je vyroben ze vynikajícího měkkého silikonu s vloženou zakřivenou silikonovou trubičkou (varianta i bez hadičky). Žíly nejsou viditelné, ale lze je nahmatat přes kůži. Procvičte si IV zavedení nebo odběr krve. Je vhodný pro použití na osobě i na figuríně. Termoplastická fólie chrání rameno před proražením. Plast stačí zahřát v horké vodě a omotat kolem paže

Tento produkt obsahuje:

- návlek na paži
- svalová vrstva
- tepelná plastová fólie

Lze mnohokrát opětovně použít.

Jak používat IV tréninkovou paži:

- obtočte plastovou fólii kolem paže
- položte na něj červenou svalovou část
- vyplňte zářezy hadičkami a zakryjte kůži.
- odpojte jednu stranu hadičky od konektoru a odstraňte vzduch z trubice.
- naplňte zkumavku řídkou umělou krví a zkumavku znovu připojte.

- přidejte tlak stříkačkou

Při použití tenkých jehel se otvory samy uzavřou.

Tento model nebude mít dostatečný tlak k dosažení zpětného toku při zavádění jehly.

Příliš velký tlak na žílu může způsobit únik předchozích vpichů.

Tréninková paže MEDICFX Pediatric IV je vyrobena z velmi měkkého a odolného silikonu.

MW080-1 Varianta s hadičkou

MW080 Varianta bez hadičky

Rozměry: 21 x 18 cm

Hmotnost: 0,3 kg

Materiály: Platinium Silikon, vložená síťovina, [silikonové trubičky], tepelná plastová fólie

Možnosti:

MW080-LIWOT - kojeneček

MW080-LAWOT - dospělý