

Dětská IV paže - Kojenec



Popis

Realistická kojenecká paže se zapuštěnou kruhovou hadičkou na použití umělé krve pro IV trénink. Tato kojenecká intravenózní tréninková paže je skvělá pro nácvik odběru krve, zavádění IV, podávání injekcí nebo pro účely očkování. Paže je vyrobena z vynikajícího měkkého silikonu s vloženou zakřivenou silikonovou hadičkou. Žíly jsou částečně viditelné a lze je nahmatat. Procvičte si IV zavedení nebo odběr krve.

Tento produkt obsahuje:

- Tréninková paže
- Výměna hadička
- Opravný silikon 40 gramů
- Stříkačka 30ml
- Stříkačka 10 ml Jak používat cvičební IV paži Infant:
- Použijte řídkou umělou krev a naplňte 30ml stříkačku
- Připojte stříkačky k uzávěrům
- Naplňte zkumavku krví, dokud se 10ml stříkačka nenaplní.
- Lehce zatlačte na obě stříkačky a na 10ml stříkačku zatlačte o něco silněji.
- Při použití tenkých jehel se otvory samy uzavřou. Tím zajistíte dlouhou životnost ramene.
- Chcete-li hadičku vyměnit, odpojte od hadičky konektory Luer Lock a hadičku vytáhněte.
- Lehce namažte vnější stranu náhradní hadičky vazelínou a vložte ji.

- Jakmile se hrot objeví v dlani, provlékněte hadičku do prázdného otvoru a zatlačte, dokud se konec hadičky neobjeví v lokti. Vytáhněte na požadovanou délku.
- Znovu připojte konektory Luer Lock.

Tato kojenecká paže lze také použít k odběru krve. Tento model dokáže dosáhnout zpětného toku při kanylaci, pokud je na stříkačkách udržován tlak. Tlak může způsobit netěsnosti v místech předchozích vpichů uvnitř modelu a způsobit netěsnost modelu z míst zavedení hadičky v dlani a lokti. Po určité době používání se mohou některé oblasti modelu proděravít. Tyto povrchové perforace v místech vpichu jehly lze opravit opravným silikonem, který je součástí tohoto modelu.

ROZMĚRY: velikost paže kojence

HMOTNOST: 0,5 kg

Pokyny pro péči:

- Silikon lze omýt teplou mýdlovou vodou a dezinfikovat izoalkoholem.
- Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem (mírná teplota).
- K zmatnění lesklých míst nebo odstranění lepivosti můžete použít pudr v podobě talku.
- Tento výrobek skladujte čistý a suchý v tmavém a chladném prostředí.
- Po častém používání se může některá oblast propíchnout a začít prosakovat.

To lze opravit silikonem ze sady na opravu. (zdarma pro 5 a více ramen)