

## Novorozenec Natalie s rozštěpem



### Popis

Novorozenec Natalie s rozštěpem, jedinečná možnost tréninku.

Naše novorozené miminko Natalii si můžete objednat s vrozenými vadami, jako je rozštěp rtu nebo patra. Protože je obtížné tyto děti krmit, vytvořili jsme další možnost nasogastrické nebo orogastrické zavedení trubičky. Skvělá příležitost pro rodiče a zdravotní sestry, aby si tento postup natrénovali. Při správném zavedení projde bílá tekutina trávicí soustavou miminek a skončí v plence. Dítě lze samozřejmě ventilovat i s viditelným zvednutím hrudníku.

Jako porodní miminko je dostatečně pružné, aby se složilo do těhotenského břicha nebo dělohy, a dostatečně odolné, aby vydrželo císařský řez nebo vaginální porod. Dítě lze intubovat a ventilovat s viditelným zvednutím hrudníku. Její ústa a nos lze vyčistit. Pupeční pahýl má 3 krevní linie a lze z něj odebrat krev. (Před každým použitím je třeba krev zavést.)

Každé dítě je jedinečně zbarvené a má řasy a vlasy. Protože jsou vlasy velmi zranitelné, jsou navlhčeny silikonem. Také se tím vytvoří mokřý vzhled novorozence.

Součástí balení je:

- Realistické silikonové miminko

- Body a dudlík, měkká zavinovačka a čepička
- Sada pro péči se šamponem a dětským pudrem
- Plastový úložný kufřík

Rozměry: Délka 50 cm, obvod hlavy 37 cm.

Hmotnost: 3,2 kg. Celková hmotnost s plastovým úložným pouzdem 4 kg.

Materiály: Platinový silikon, mohér.

Pokyny pro péči:

- S miminkem je třeba zacházet jako se skutečným novorozencem. Netahejte ho za ruce ani nohy a netahejte za vlasy.
- Natálku můžete omýt horkou vodou a v případě potřeby očistit alkoholem.
- Model neponořujte do vody, protože by se mu zaplnily plíce.
- Před uložením novorozence osušte měkkým ručníkem a fénem a přepudrujte.
- Pokud se silikon trochu leskne, otřete jej iso alkoholem a přepudrujte dětským pudrem.
- Modely lze opravit pomocí sady na opravu silikonu FX.

Možnosti školení:

Trénink normálního nebo nouzového císařského řezu.

Vaginální porod na mnoha různých modelech porodních figurín.

Intubace a ventilace s viditelným zvedáním hrudníku je možná pomocí vaku nebo ventilátoru.

Odběr krve z pupečnickové žíly.

Dítě s placentou lze umístit do polohy koncem pánevním uvnitř břicha/dělohy pro nácvik obtížných porodů.

Nácvik pro nové rodiče, aby se naučili koupat a oblékat své dítě.