

Intenzivní krvácení - noha pro trénink obvázání rány



Popis

Volně stojící silikonový pahýl nohy s velkou ránou pro nácvik kontroly krvácení.

Tento trenažér rány má měkkou tkáň a zlomenou kost pro zvýšení úrovně obtížnosti. Skrytou hadičku (žilou), kterou lze připojit k systému pumpy nebo injekční stříkačce.

Tento produkt obsahuje:

- Silikonový cvičný pahýl nohy
- injekční stříkačka 50 ml

Jak používat tento trenažér:

- Naplňte zkumavku řídkou krví
- Stříkačkou natlakujte
- Zabalte ránu - Pozor, ne všechny náplasti ulpívají na silikonu

Tento trenažér MEDICFX je vyroben z velmi měkkého a odolného silikonu.

Rozměry: 10 x 9 cm

Materiály: Platinový silikon, plastové hadice

Pokyny pro péči:

silikon lze omýt teplou mýdlovou vodou a dezinfikovat izoalkoholem.
Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem. K odstranění lesklých míst nebo odstranění lepivosti můžete použít mastek.
Tento výrobek skladujte čistý a suchý na tmavém a chladném místě.