

Mini trenážér pro tamponování ran



Popis

Volně stojící silikonový model pahýlu s hlubokou ránou pro nácvik kontroly krvácení. Rána má měkkou tkáň a zlomenou kost pro zvýšení obtížnosti. Trenážér má vestavěnou krevní hadičku.

Jak tento trenážér používat:

- . Naplňte hadičku řídkou krví
- . Ošetřete ránu - Mějte na paměti, že ne všechny náplasti drží na silikonu.

Rozměry:

- * Průměr 7 cm
- * Základna 9 cm v průměru a 5 cm na výšku

Hmotnost: 0,28 kg

Materiály: Platinový silikon, vložená 20cm hadička (umělá žíla) s luerem

Pokyny pro péči:

Silikon lze mýt teplou mýdlovou vodou a dezinfikovat isoalkoholem.

Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem s nízkou teplotou.

K odstranění lesklých míst nebo odstranění lepivosti můžete použít mastek.

Tento výrobek skladujte čistý a suchý na tmavém a chladném místě.

Silikon lze v případě potřeby snadno opravit pomocí našich sad na opravu silikonu FX.