

Intenzivní krvácení - dolní končetina



Popis

Model MT819 je vysoce realistická volně ležící traumatická dolní končetina určená pro nácvik komplexní první pomoci, vojenský výcvik a kontrolu krvácení. Nabízí téměř realistický zážitek při aplikaci škrtidla a zvládnání krvácení, což z ní činí ideální nástroj pro praktické výcvikové scénáře.

Klíčové vlastnosti:

- Přizpůsobitelnost: model lze přizpůsobit různým scénářům zranění, včetně hlubokých poranění způsobených výbuchem (s úlomky kostí nebo bez nich), hlubokých ran se zasazenými střepinami, otevřených zlomenin holenní kosti/fibule, střelných poranění, poranění motorovou pilou a složitých poranění kolena.

- Realistické krvácení: model je vybaven vloženým krevním řečištěm a umožňuje realistické použití škrtidla a nácvik kontroly krvácení. Krevní hadičku lze pro dynamickou simulaci připojit ke krevní pumpě nebo injekční stříkačce.

- Odolné materiály: díky ruční výrobě z měkkého, odolného platinového silikonu a síťovému podkladu pro větší pevnost vydrží tento model opakované použití v tréninkovém prostředí.

- Realistický vzhled: každá noha je pečlivě ručně malovaná umělci FX, aby byl zajištěn autentický a realistický design, který umocňuje zážitek z tréninku.

Součástí produktu je:

Silikonový model nohy

Vložené hadičky na krev

Vak na krev

Pohodlná taška na přenášení

Pokyny pro péči:

NETAHEJTE za vlasy a chlupy [pokud jsou na modelu] a model čistěte velice jemně.

Protože silikon je produkt na bázi oleje, může se časem trochu lesknout. Veškeré mastné zbytky setřete isopropylalkoholem.

Pro zmatnění lesklých míst můžete použít mastek.

Silikon lze omýt teplou mýdlovou vodou a dezinfikovat izoalkoholem. Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem s mírnou teplotou.

Ujistěte se, že je z umělých žil odstraněna veškerá krev, a nepoužívejte krev na bázi sirupu.

Model skladujte čistý a suchý v tmavém a chladném prostředí.

Modely lze opravit pomocí naší sady na opravu silikonu FX.

Rozměry a hmotnost: Střední mužská dolní