
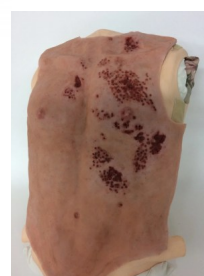


## Torzo - střelná poranění - návlek

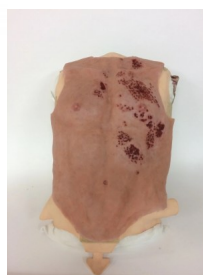

### Popis

Navrženo pro vojenské účely a účely simulace traumatu. Nejrealističtější a nejuniverzálnější návleky imitací poranění.

Toto torzo je navrženo pro účely simulace traumatu. Může být použito jak na model, tak ho mohou nosit i figuranti. Je vyrobeno z vysoce kvalitního silikonu se síťovinou pro větší pevnost.

Torzo je přizpůsobeno pro figurínu traumatu, jako je Crash Kelly ALS nebo podobné menší figuríny. U větších figurín funguje tak, že se okraje zakryjí oblečením.

Produkt obsahuje:

Silikonové torzo  
Zádový panel Veltex  
Plastový úložný box

Tento model lze objednat v různých stupních popálenin a v různých barvách kůže. Pokud si společně s tímto modelem koupíte návlek na obličej pro stejný scénář popálení, můžeme u těchto produktů sladit stejné popáleniny a odstíny pleti.

Jak používat torzo:

Pro použití na SP se pro větší pohodlí doporučuje nosit pod torzem tílko.  
Spojte suchý zip na silikonové kůži se zadním panelem Veltex.  
Noste kalhoty/šortky a košili, která zakryje záda a paže.  
V případě potřeby lze přidat saze, krev a nečistoty. Smíchejte krev s trochou tekutého mýdla, abyste zabránili tvorbě kapek.  
Připojte hadičku ke krevní pumpě, abyste aktivovali krvácivé body.

Rozměry: malý/střední muž, od pupíku k rameni je 51 cm.

Hmotnost: 2 kg, hmotnost včetně plastového úložného boxu je 3,5 kg.

Materiály: Platinový silikon, podkladový materiál Veltex, olověné pelety