

Torzo - střepiny - návlek



Popis

Toto torzo trupu, návlek, je navrženo pro účely simulace traumatického poranění. Může být použito jak na model, tak ho mohou nosit i figuranti. Je vyrobeno z vysoce kvalitního silikonu s podšívkou ze síťoviny (pro větší pevnost). Tento trup má 4 krvácivé body z 1 hadičky, kterou lze připojit ke krevní pumpě. Úlomky šrapnelu jsou vyrobeny z lakovaného plastu a pro použití jsou bezpečné.

Torzo je přizpůsobeno pro trauma figurínu, jako je Crash Kelly ALS nebo podobné menší figuríny. U větších figurín funguje tak, že se okraje zakryjí oblečením.

Produkt obsahuje:

- Silikonové torzo
- Zádový panel Veltex
- Plastový úložný box

Jak používat torzo:

Pro použití na SP se pro větší pohodlí doporučuje nosit pod torzem triko. Spojte suchý zip na silikonové kůži se zadním panelem Veltex. Noste kalhoty/šortky a košili, která zakryje záda a paže.

V případě potřeby lze přidat saze, krev a nečistoty. Smíchejte krev s trochou tekutého mýdla, abyste zabránili tvorbě kapek.

Připojte hadičku ke krevní pumpě, abyste aktivovali krvácivé body.

Rozměry: malý/střední muž, od pupíku k rameni je 51 cm.

Hmotnost: 2,5 kg, hmotnost včetně plastového úložného boxu je 3,5 kg.

Materiály: Platinový silikon, podkladový materiál Veltex, silikonové krevní linie

Pokyny pro péči:

Netahejte za vlasy [pokud jsou] a model čistěte opatrně. Silikon je produkt na bázi oleje, proto se může časem mírně lesknout. Lesklé oblasti můžete zmatnit pomocí pudru.

Po použití olejové zbytky otřete izopropylalkoholem, silikonové části opláchněte teplou mýdlovou vodou a dezinfikujte izopropylalkoholem. Důkladně osušte měkkým ručníkem nebo fénem.

Skladujte položené v úložném pouzdře v suchém, tmavém a chladném místě.

Zadní panel lze omýt samostatně a sušte položený na rovině.

Modely lze opravit pomocí opravné sady FX Silicone Repair Kit.