

## Torzo staršího muže - návlek



### Popis

**Torzo, které promění váš simulátor muže pro realističtější a poutavější simulační trénink**

Torzo bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se dalo používat s realistickou obličejovou maskou. Je určeno pro figuríny i standardní pacienty. Vyrobeno je ze silikonu, síťovinový podklad zabraňuje roztržení. Návlek má vzadu zapínání na suchý zip, snadno se obléká a udržuje.

### Jak používat torzo:

- Pro figuranty je nejlepší nosit pod návlekiem bavlněné tílko. U figurín se dá použít rovnou na tělo.
- Ke spojení stran vzadu použijte nejdelší pásek na suchý zip .
- Kratší popruhy spojují ramena se zádočným popruhem.
- Noste kalhoty/šortky a košili/tričko, abyste zakryli záda a paže.
- V případě potřeby lze přidat krev a nečistoty. Smíchejte krev s trochou tekutého mýdla, abyste zabránili tvorbě kapek.
- GelFX lze použít k vytvoření ran nebo jizev.

### Tento produkt obsahuje :

- Silikonové torzo
- Podklad z tkaniny na suchý zip

- Návlek lze objednat v různých barvách kůže