

Poranění s hloubkovou sepsí - základní model





Popis Silikonový trenažér pro nácvik čištění a obvazování velmi hlubokého septického vředu až ke kosti Základní model obsahuje: - Silikonový model pahýlu s hnisem a svaly - Zabudovaná krevní linie - Plastové úložné pouzdro Návod k použití: Pahýl položte na rovný hladký povrch, přilepí se a zůstane na místě. Trochu silikonového hnisu je již aplikováno na ráně a na kosti Ránu lze vyčistit pomocí FX flesh&pus Smíchejte část krve s tekutým mýdlem a vodou. Naplňte injekční stříkačku krví a připojte se k krevní linii, trochu zatlačte, abyste ji vystříkli do rány. Nyní je připraven k použití pro trénink. Tamponem opatrně odstraňte hnis a kontaminované kousky z rány. Když se krevní linie vyčistí, rána začne krvácet a rána je připravena k převazu. je potřeba dbát na to, že páska na silikonu příliš nedrží. Tento trenažér MEDICFX je vyroben z velmi měkkého a odolného silikonu. Rozměry: 22 cm x 10 cm x 9 cm Hmotnost: 1,3 kg, 2,3 kg s pouzdem Materiály: Platinový silikon, vložené krevní linie