

Poranění s hloubkovou sepsí





Popis

Silikonový trenažér pro nácvik čištění a obvazování velmi hlubokého septického vředu až ke kosti

MW822 - Základní model obsahuje:

- Silikonový model pahýlu s hnisem a svaly
- Zabudovaná krevní linie
- Plastové úložné pouzdro

MW822-1 - Kompletní model obsahuje:

- Silikonový tréninkový pahýl
- Zabudovaná krevní linie
- 50 ml umělé krve
- FXPus & Flesh
- Červ, střepina, silikonové sklo, pěnová špína
- 2 alkoholové tampony
- Stříkačka
- Plastové úložné pouzdro

Návod k použití:

Pahýl položte na rovný hladký povrch, přilepí se a zůstane na místě.

Trochu silikonového hnisu je již aplikováno na ráně a na kosti

Ránu lze vyčistit pomocí FX flesh&pus

Smíchejte část krve s tekutým mýdlem a vodou.

Naplňte injekční stříkačku krví a připojte se k krevní linii, trochu zatlačte, abyste ji vystříkli do rány.

Nyní je připraven k použití pro trénink.

Tamponem opatrně odstraňte hnis a kontaminované kousky z rány.

Když se krevní linie vyčistí, rána začne krvácet a rána je připravena k převazu. je potřeba dbát na to, že páska na silikonu příliš nedrží.

Tento trenažér MEDICFX je vyroben z velmi měkkého a odolného silikonu.

Rozměry: 22 cm x 10 cm x 9 cm

Hmotnost: 1,3 kg, 2,3 kg s pouzdem

Materiály: Platinový silikon, vložené krevní linie