

Intramuskulární injekční model svalů horní části paže



Popis

Cvičte injekce do svalů horní části paže bezpečně na realistickém modelu, který poskytuje okamžitou zpětnou vazbu, aby byl trénink efektivnější a smysluplnější.

Tento pokročilý lékařský model byl vyvinut, aby se zabránilo nebezpečí vpíchnutí jehly do nervů a žil ve svalech horní části paže.

Struktura horní části paže je zobrazena v modelu pro výuku správného vstříkávání. Vnější povrch byl speciálně zpracován tak, aby poskytoval velmi realistickou simulaci a nezanechává žádné stopy po vstříkávání, aby model zůstal v dobrém stavu.

Součástí je apofýza akromia a další kosti, což umožňuje potvrdit místa vpichu palpací.

Když je injekce podána na špatném místě nebo je-li podána příliš hluboko, rozsvítí se červené světlo, zazní varovný bzučák a nervová lampa zobrazí místo, kde došlo k chybě. Model také zobrazuje zelené světlo pro injekce provedené na bezpečných místech.

Tyto indikátory posilují správnou techniku a zabraňují uživatelům dělat stejné chyby.

Lékařské tekutiny (voda) mohou být také vstříkovány, aby se tento model stal cenným instrukčním nástrojem.