

Celotělový porodnický model



Popis

Možnost nácviku několika úkonů pomocí výměnných modulů - externí vyšetření těhotné ženy, vnitřní vyšetření různých fází porodu, praktický nácvik porodní asistence, perineální šití jemných porodních cest, palpace dělohy během šestinedělní i vyšetření prsu. Při nácviku porodní asistence je možné model umístit nejen do polohy na zádech, ale i do polohy na všech čtyřech nebo laterální pozice.

Vlastnosti

Palpační porodní modul

- představuje těhotenství 36. až 40. týdne
- možnost nácviku vizuální diagnostiky, palpace a abdominální měření (obvod břicha, fundální výška) podle čtyř typů Leopoldových manévrů, monitorování srdeční činnosti plodu a péče o prsa matky
- změna pozice a orientace plodu umožňuje diagnostiku v různých pozicích a orientacích plodu
- možnost nastavení srdeční činnosti plodu mezi 80 a 180 ozvy za minutu

Modul vaginálního vyšetření

- možnost sestavení Bishopova (cervikálního) skóre od pozdního těhotenského stádia až po počátek porodu (dilatace děložního hrdla, konzistence a pozice)
- tři modely s různými stádii dilatace děložního hrdla společně s modelem hlavy plodu
- ty je možné zaměňovat a nastavovat, aby bylo možné měřit postup porodu vaginálním

vyšetřením

- hlavu plodu je možné využít i pro zjišťování rotace plodu změnou pozice sagitálních stehů a zadní fontanelou
- vulva obsahuje uretrální otvor pro zavedení močového katétru

Modul porodní asistence

- vulva je vyrobena za vysoce realistického a odolného materiálu, který snižuje odpor a redukuje množství síly nutné při extrakci plodu během porodu a tím umožňuje plynulý nácvik
- nácvik ochrany hráze
- možnost nácviku porodu koncem pánevním
- pupeční šňůra je jemná a je možné na ní provádět nácvik stříhání a následně sešívání
- model plodu s placentou je možné použít pro nácvik celé sekvence kroků od porodu plodu, po sešívání a přestřihnutí pupeční šňůry, stejně jako pro porod placenty
- placentární membránu je možné oddělit na tři části a provádět tak vyšetření placenty a kontrolu, zda je v neporušeném stavu

Modul perineálního šití

- tento model umožňuje potvrzení polohy a rozsahu perineální lacerace a následný nácvik nápravy a šití
- možnost nácviku použití kleští

Palpační puerperální modul

- součástí jsou čtyři druhy puerperálních modelů dělohy (normální a abnormální stav prvního dne, normální stav třetího a pátého dne); tyto modely je možné měnit pro provádění diagnózy postupu návratu dělohy pomocí palpce a měření abdominální oblasti

Modul vyšetření prsu

- tento model umožňuje základní péči o prsa, včetně palpce prsu i bradavky, kontrola pohyblivosti prsu a masáž bradavek

Rozměry: cca 177 x 44 x 25 cm

Hmotnost: cca 17 kg