

Respirátor FFP2 bal 5 ks



Popis

Tento respirátor je vyroben z lehkého a prodyšného materiálu s vysokou filtrační účinností 99 %. Jeho pohodlný ergonomický tvar a uchycení pomocí elastických pásků. Nízký tlakový odpor vám umožní snadné dýchání. Provedení bez výdechového ventilu filtruje i vydechovaný vzduch a je tak bezpečné i pro vaše okolí. Respirátor je vyroben z příjemného materiálu a je tak šetrný i k vaší pokožce.

Vlastnosti:

Lehký a prodyšný materiál s vysokou filtrační účinností 99 %, podloženo výsledky laboratorních testů ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce - ZL, Praha 15. 4. 2020 zkoušky podle CSN EN 149+A1

Pohodlný ergonomický tvar a uchycení pomocí elastických pásků.

Snadné dýchání díky nízkému tlakovému odporu, bez výdechového ventilu.

Šetrný k pokožce.

Doporučené použití:

Před nasazením mějte vždy čisté ruce. S rubovou stranou směřující nahoru použijte poutka k oddělení vrchního a spodního panelu a vytvoření mušlového tvaru. Nosní svorku ve středu mírně ohněte. Ujistěte se, že oba panely jsou zcela rozložené. Uchopte respirátor jednou rukou, otevřenou stranou směrem k obličeji. Druhou rukou uchopte oba pásky. Respirátor přidržujte pod bradou, nosní svorkou vzhůru, a přetáhněte pásky přes hlavu. Vrchní pásek umístěte přes temeno hlavy a spodní pásek pod uši. Pásky nesmějí být zkroucené. Vrchní a spodní panel nastavte tak, aby pohodlně seděly, přičemž panely a poutko na bradě nesmějí být ohnuté dovnitř.

Za použití obou rukou vytvarujte nosní svorku podle spodní části nosu tak, aby byl respirátor správně a těsně nasazen. Použijete-li k vytvarování svorky pouze jednu ruku, může se snížit účinnost respirátoru.

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Můžete zakoupit zde: <http://www.arescue.cz/respirator-ffp2-bal-5-ks/>