

Torzo ženy - návlek



Popis

Torzo (návlek), které rozšíří vaše scénáře a zvýší realističnost výuky, zejména v kombinaci s některou z našich obličejových masek.

Toto torzo bylo navrženo a vyrobeno tak, aby bylo vhodné pro použití s některou z geriatrických obličejových masek. Návlek lze použít na figuríny i na figuranty. Tento návlek je vyroben ze silikonu a má síťovanou podložku, která zabraňuje roztržení, návlek perfektně sedí na traumatologických figurínách, jako je Crash Kelly, ALS nebo podobné menší figuríny. Pro SimMan je malý, ale dobře funguje s oblečením, které zakryje boky a záda.

Jak používat návlek:

U figurantů je vhodné mít pod návlekiem oblečené bavlněné triko. U figurín se dá použít přímo na model.

Ke spojení boků na zádech použijte nejdelší textilní pásek na suchý zip, kratší pásy spojují ramena se zadním páskem.

Na návlek si oblékněte kalhoty/šortky a tričko, které zakryjí záda a paže.

V případě potřeby lze přidat umělou krev a simulaci nečistoty. Umělá krev se smíchá s trochou tekutého mýdla, aby se netvořily kapičky.

K vytvoření ran nebo jizev lze použít GelFX.

Při zakoupení návleku společně s obličejovou maskou budou oba vyrobeny ve stejné základní barvě. Lze je také slepit k sobě, takže není třeba zakrývat žádné okraje. Další rány lze přidat pomocí našich samolepicích listů.

Všechna torza lze objednat v různých barvách pleti.