

Děloha



Popis

Velmi pružná silná děloha vyrobená z vysoce kvalitního silikonu. Lze ji použít pro normální porod i císařský řez a další porodnický výcvik. Do dělohy se vejde i plně donošené dítě.

Tento výrobek obsahuje měkkou silikonovou dělohu a 5 malých kabelových úvazků.

Jak používat dělohu:

- Dítě namažte a připojte pupeční šňůru.
- Vložte dítě s placentou do dělohy tak, jak potřebujete.
- Naplňte kondom vodou, zavažte ho a vložte ho také do dělohy, kde bude nástřih.
- Dělohu pevně uzavřete pomocí šňůrky.
- Umístěte dělohu s miminkem pod silikonové břicho.
- Horní a dolní část zakryjte oděvem.
- Břicho a dělohu lze rozříznout a vyjmout dítě.

Dělohu lze sice naplnit vodou, ale bude příliš těžká na to, aby zůstala v těhotenském břiše. Doporučujeme naplnit velký kondom vodou, zavázat ho a umístit ho do dělohy v místě, kde bude řez. Tímto způsobem bude přítomna "amniová tekutina", ale nebude jí příliš mnoho. Placentu můžete umístit kamkoli do dělohy, ale nedávejte ji tam, kde bude proveden řez.

Rozměry: 35 cm X 60 cm obvod

Hmotnost: 0,2 kg

Materiály: Platinový silikon, stahovací pásky

Čištění a opravy:

Pro čištění stačí dělohu opláchnout vodou zevnitř i zvenku nebo ji otřít alkoholovou utěrkou. Před opravou dělohu důkladně osušte.

Otřete místo řezu alkoholem ISO a opravte řez podle pokynů uvedených na sadě pro opravu silikonu FX.

Dělohu uložte na bezprašné místo.

Silikon se může trochu zašpinit. Pokud se tak stane, stačí výrobek otřít trochou izopropylalkoholu a zapudrovat